

## **FOLHETO INFORMATIVO DOCULYSE ANTI TAMPÃO DE CERUME**

### **Spray auricular**

Ajuda na dissolução do tampão de cerume e eliminação do canal auditivo externo. Testado sob controlo ORL. Os tampões de cerume podem alterar a audição, provocar zumbidos ou ainda vertigens.

Doculyse da Quies permite a dissolução e evacuação do tampão de cerume, graças ao seu ativo principal, o Docusato de sódio. A sua fórmula alta tolerância foi objeto de testes sob controlo ORL.

### **CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO**

- Utilização fácil, com bomba doseadora.
- Spray sem gás propulsor.
- Certifique-se de que o cone é fixado na ponta. Colocá-lo à entrada do canal auditivo e premir a bomba. Massajar a base do ouvido. Deixar atuar 15 minutos inclinando a cabeça para o lado oposto ao ouvido a tratar. Depois, a fim de favorecer o escorrimento do líquido e dos resíduos, inclinar a cabeça para o outro lado. Sem enxaguamento.
- Limpar com um lenço limpo. Enxaguar a ponta sob água quente após cada utilização. Deixar sob água quente 30 minutos se estiver entupida.
- Para eliminar um tampão recente:  
1 a 2 pulverizações, a renovar se necessário.
- Para eliminar um tampão antigo:  
1 a 2 pulverizações, 3 vezes por dia nos 3 ou 4 dias antes da extração por um ORL.
- Preventivamente: 1 a 2 pulverizações por semana.
- Pode ser utilizado nos bebés com mais de 6 meses, crianças e adultos. Apto para pessoas com tampão de cerume ou forte secreção de cerume. Apto para os portadores de próteses auditivas, grandes produtores de cerume, após terem retirado as respetivas próteses.

### **COMPOSIÇÃO**

Docusato de sódio: 0,5 %, Citrato de sódio, Ácido cítrico, Água purificada, Fenoxietanol, Metilparabeno, Etilparabeno, Butilparabeno, Propilparabeno.

### **PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Manter longe do alcance e da vista das crianças. Em caso de dor ao nível do ouvido, consulte o seu médico. Em caso de contacto com as mucosas, enxaguar abundantemente com água. Em caso de dúvida sobre a utilização do dispositivo, peça conselho ao seu médico. Em caso de incidente grave relacionado com este dispositivo, contacte quies@quies.com e informe a autoridade competente.

### **CONTRA-INDICAÇÕES**

Não utilizar em caso de otite, perfuração da membrana do tímpano e nos portadores de ventiladores transtimpânicos ou após uma intervenção cirúrgica do ouvido. Não utilizar em caso de irritação. Não utilizar em casode alergia conhecida a um dos componentes.

## **CONSERVAÇÃO**

Recomenda-se a utilização do produto no ano que se segue após a abertura do frasco.

Qualquer

dispositivo utilizado ou aberto deve ser destruído em conformidade com as regulamentações locais que respeitam a eliminação de resíduos.

Dispositivo médico.

22274/24F  
REV.1-01/06/2024