

# aftum

gel oral  
primeiros  
dentes

Devido à sua ação protetora, reduz rapidamente a dor e a inflamação das gengivas

"Dentição" é definido como o processo de formação e desenvolvimento dos dentes na boca. Os dentes de leite (ou dentes decíduos) começam a entrar em erupção por volta dos 6/7 meses de idade, e o processo geralmente é concluído por volta dos 3 anos. Os dentes definitivos começam a aparecer aos 6 anos.

## INDICAÇÕES

O AFTUM primeiros dentes forma uma camada protetora nas gengivas das crianças. Esta camada protege as gengivas das infeções típicas das crianças, nomeadamente devido ao aparecimento da dentição ou de outros traumas.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplique uma pequena quantidade do produto 3-6 vezes ao dia, ou conforme necessário, e espalhe sobre a gengiva com um aplicador ou com o dedo (após lavar as mãos). Massage suavemente e cubra completamente a área afetada. De preferência, aplique após as refeições e na hora de dormir para proporcionar à criança um alívio mais duradouro.

## COMPOSIÇÃO

Ingrediente principal: ácido hialurónico de elevado peso molecular (sal de sódio). Outros ingredientes: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl alcohol, Cellulose gum, PEG 40 hydrogenated castor oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene copolymer, Glyceril laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium saccharin, Sodium phosphate, Aroma, Glycerophosphocholine, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Disodium EDTA. Pode conter: ácido láctico, hidróxido de sódio.

AFTUM primeiros dentes não contém álcool, açúcar, glúten, lactose, parabenos, SLS or OGM. Não foram reportados quaisquer problemas após a ingestão acidental do produto.

## CONTRAINDICAÇÕES

Não utilizar em caso de hipersensibilidade individual conhecida aos ingredientes.

## PRECAUÇÕES E AVISOS

Não utilizar se a bisnaga estiver aberta ou danificada.

Após a utilização, elimine todos os resíduos do produto da embalagem antes de a fechar.

Este produto é para utilização pessoal.

Não utilizar após o prazo de validade.

Manter fora do alcance das crianças.

Se o produto, Aftum primeiros dentes, for usado ao mesmo tempo que outros produtos, consulte seu médico.

## APRESENTAÇÃO

AFTUM Primeiros dentes: bisnaga de 15 ml.

Distribuído por:




Estrada Consiglieri Pedroso, 123,  
Queluz de Baixo  
2734-501 Barcarena

Fabricado por:



Via G. Leopardi, 21  
20123 Milano - Italy  
www.bioplaxpharma.com

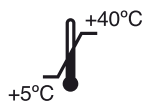

AF4803-00/A  
Release May 2022